

Anleitung zur Probenentnahme

Videoanleitungen und Tipps finden Sie auf unserer Website:

www.feragen.at/probenentnahme

				
idealerweise morgens		2h kein Zugang zu Futter	1h vorher kein Leckerli	2h vorher keine Muttermilch

PROBENENTNAHME



Bürstchen **nur** zwischen **oberer Lefze und Kiefer** mind. **45 Sekunden drehend** vor und zurück ziehen.



Nach der Probenentnahme:

1. Bürstchen in das Gefäß geben
 2. An der Sollbruchstelle (rote Markierung) abbrechen
 3. Gefäß verschließen und ca. 10 x schwenken
- Ein Trocknen der Bürstchen ist nicht mehr nötig!**

Noch Fragen? Unser Kundendienst hilft Ihnen gerne weiter!